

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu**
 Oznaczenie arkusza: **Z.18-01-17.01**
 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.18**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka -

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*													Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Rezultat 2: Karta doboru aparatów słuchowych i wkładek*Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie.*

1	na ucho lewe wybrano aparat numer 2																		
2	na ucho prawe wybrano aparat numer 2																		
3	na ucho lewe i prawe wybrano ten sam aparat																		
w uzasadnieniu wyboru aparatu zapisano:																			
4	zakres dopasowania aparatu obejmuje zakres ubytku słuchu pacjenta																		
5	szerokie pasmo przenoszenia zapewnia dobrą jakość dźwięku																		
6	aparat typu RIC jest bardzo mały/dyskretny/niewidoczny																		
7	wybrano wkładkę numer 6 lub 7 na ucho lewe i prawe																		
8	wpisano średnicę wentylacji: otwarta lub dopasowanie otwarte lub przy wyborze wkładki numer 6 wentylacja w zakresie powyżej 2 mm																		
w uzasadnieniu wyboru wkładki zapisano:																			
9	wkładka odpowiednia do zakresu niedosłuchu pacjenta																		
10	a) wkładka zapewnia dobrą wentylację ucha/na koncertach ucho nie będzie się pocić, b) wkładka jest dyskretna, c) zapewnia naturalne i komfortowe słyszenie przy odpowiednim wzmocnieniu dźwięków mowy, d) pozwala zminimalizować/uniknąć efektu okluzji <i>Kryterium uznać za spełnione, jeśli zdający wymieni co najmniej 3 z 4 elementów.</i>																		

Rezultat 3: Instrukcja użytkowania i pielęgnacji aparatu słuchowego, w instrukcji zawarto informacje:									
1	o codziennej obsłudze: włączanie/ wyłączanie, wymiana baterii, przełączanie programów,								
2	o ochronie aparatu słuchowego przed wilgocią lub unikaniu wody lub zdejmowaniu aparatu w sytuacjach grożących jego zawilgoceniem, np. kąpiel, deszcz								
3	o osuszaniu aparatu z wykorzystaniem kapsułek osuszających lub osuszających pojemników elektronicznych								
4	o wyłączaniu nieużywanego aparatu i wyjmowaniu z niego baterii								
5	o ochronie przed uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym								
6	o sprawdzaniu stanu filtrów								
7	o czyszczeniu aparatu specjalnymi chusteczkami								
Rezultat 4. Odlew ucha									
1	wycisk jest zakończony tamponikiem								
2	masa silikonowa nie przeszła za tamponik								
3	długość wycisku za drugi zakręt przewodu słuchowego (lub jest zgodna z wyciskiem wzorcowym)								
4	masa silikonowa jest jednolita – ma jednolity kolor i konsystencję								
5	nie ma pęcherzyków powietrza								
6	wycisk jest estetycznie wykonany, tzn.: powierzchnia jest gładka, brak ubytków w masie i jest odcisnięta cała muszla małżowiny								

Przebieg 2: Przebieg przeglądu aparatu słuchowego z wkładką uszną.

Uwaga! Zdający wykonuje tę procedurę podczas zastygania masy wyciskowej. Ze względu na konieczność zachowania ciszy w trakcie egzaminu zdający podczas kontroli stanu technicznego aparatu nie powinien wypowiadać żadnego tekstu.

Zdający:

1	odłączył wkładkę od aparatu i umieścił w myjce ultradźwiękowej										
2	osuszył wkładkę; usunął wodę z wentylacji i dźwiękowodu przy pomocy gruszki										
3	otworzył komorę baterii, wyjął, obejrzał baterię, sprawdził jej stan testerem, sprawdził styki wewnątrz komory baterii										
4	dokładnie obejrzał obudowę aparatu słuchowego w poszukiwaniu uszkodzeń mechanicznych										
5	odłączył rożek od aparatu, nie powodując uszkodzeń										
6	sprawdził, czy aparat słuchowy ma czyste wloty słuchawki i mikrofonu, założył z powrotem prawidłowo rożek										
7	założył stetoklip na rożek aparatu										
8	odsłuchał aparat: włączył go, zmieniał programy i/lub regulował głośność potencjometrem										
9	ponownie podłączył wkładkę do aparatu										
10	korzystał podczas przeglądu z lupy										

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis