

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.20**

Numer zadania: **01**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL i z kodem
ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.20-01-14.05

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

Układ graficzny © CKE 2013

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - symbol cyfrowy zawodu,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Do Centralnej Sterylizatorni dostarczono skażone narzędzia:

- igłotrzymacze (imadła) z Poradni Chirurgicznej – 3 sztuki;
- kleszczyki Kocher z Poradni Chirurgicznej – 2 sztuki;
- pęsety chirurgiczne z Bloku Operacyjnego – 4 sztuki;
- nożyczki chirurgiczne z Bloku Operacyjnego – 2 sztuki.

Wypełnij protokół zdawczo-odbiorczy dla dostarczonego sprzętu.

Uzupełnij kartę procesów dekontaminacji dla dostarczonego sprzętu zgodnie z klasyfikacją Spauldinga.

Przygotuj 1 litr roztworu preparatu myjąco-dezynfekującego o stężeniu 2%. Wykonaj proces mycia i dezynfekcji jednej pęsety chirurgicznej. Kartkę z wypełnioną etykietą wytnij z arkusza, połóż obok wianienki dezynfekcyjnej. Po wykonanej dezynfekcji, kartkę z etykietą opisz swoim numerem PESEL i włóż do arkusza egzaminacyjnego, a wysuszoną pęsetę odłóż na tacę z narzędziami. Uporządkuj stanowisko pracy.

Po zgłoszeniu gotowości przez podniesienie ręki i uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego, przygotuj roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego oraz wykonaj mycie i dezynfekcję pęsety chirurgicznej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:

- wypełniony Protokół zdawczo-odbiorczy,
- wypełniona Karta procesów dekontaminacji,
- wypełniona Etykieta

oraz

przebieg przygotowania roztworu preparatu myjąco-dezynfekującego i wykonania mycia i dezynfekcji pęsety chirurgicznej.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Lp.	Data*	Nazwa oddziału	Nazwa sprzętu	Ilość szt.	Osoba zdająca sprzęt <i>podpis</i>	Osoba odbierająca sprzęt <i>podpis</i>
					YYYYY	XXXXX
					YYYYY	XXXXX
					YYYYY	XXXXX
					YYYYY	XXXXX

*należy przyjąć datę egzaminu

Karta procesów dekontaminacji

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość szt.	Metoda mycia i dezynfekcji/ parametry procesu	Metoda sterylizacji/ parametry procesu	Kasacja/ utylizacja tak/nie **

**wpisać właściwe

Etykieta

Data i godzina sporządzenia roztworu roboczego***	
Nazwa środka dezynfekcyjnego	
Stężenie roztworu	
Czas działania	
Podpis osoby sporządzającej roztwór roboczy	XXXXXXXXXXXXXX

***należy przyjąć datę i godzinę wynikającą z danego dnia egzaminu

PESEL